



* Návod k obsluze mějte prosím vždy po ruce pro budoucí použití


Vkládání baterie

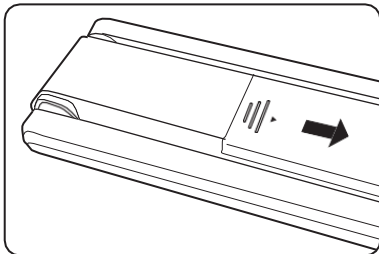

1. Otevřete kryt pouzdra baterie na zadní straně zařízení

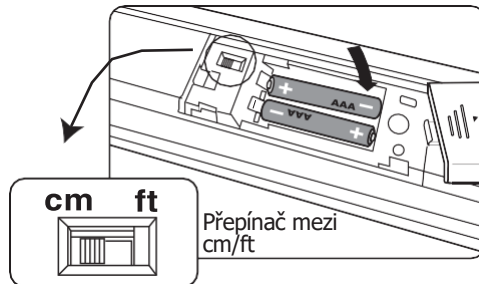



2. Vložte 2 AAA baterie

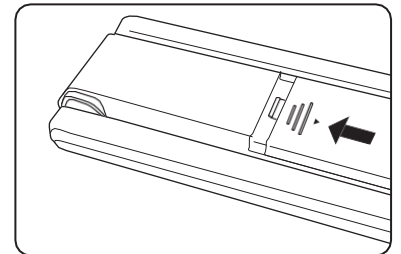







3. Zavřete kryt pouzdra baterie

Příprava na měření

Správné použití

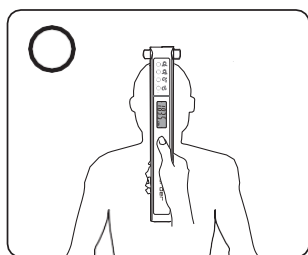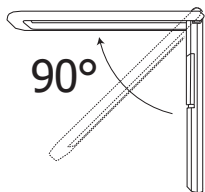



Nesprávné použití

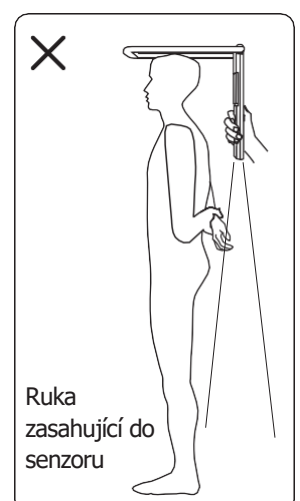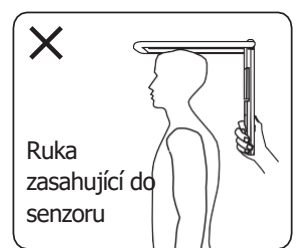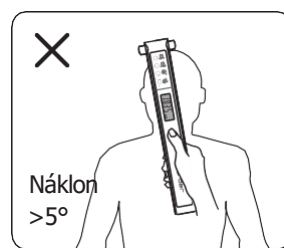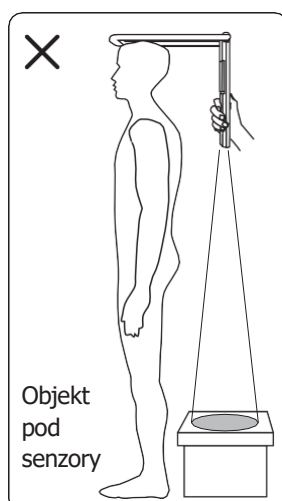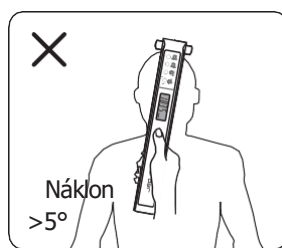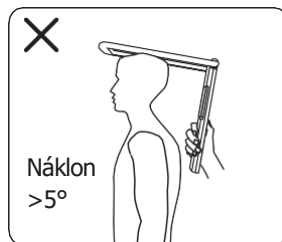



Provozní pokyny

1. stiskněte  zapněte zařízení

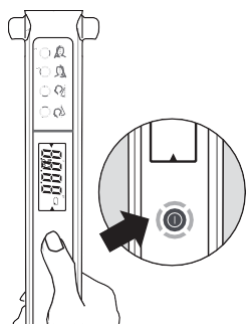

2. Když se na obrazovce zobrazí 0,0 cm , stiskněte jej znovu k měření výšky

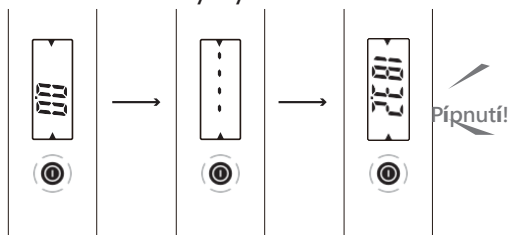

3. Po dokončení měření*, stiskněte  proved'te další měření



4. Stisknutím a podržením tlačítka vypnete přístroj. Zařízení se automaticky vypne po 20 sekundách, pokud se nepoužívá

* POZNÁMKA: U bezdrátového modelu budou výsledky přeneseny automaticky do přijímacího zařízení



Specifikace

Model		HM250U
Měření výšky	Měřicí rozsah	50-250 cm 1'8"- 8'0"
	Dělení stupnice	0,1 cm / 0,1 palců
	Přesnost	+/- 1 cm
	LCD obrazovka	50 x 20 mm
Rozměry	Složený	349(Š) x 64 (D) X 23(H) mm
	Rozložený	349 (L) X 315 (D) X 30(H) mm
Hmotnost přístroje		190 g (bez baterie)
Klíčové funkce		On/Off/Measure (měření)
Přenos dat		Bezdrátový (volitelný)
Napájení		2 AAA baterie
Provozní teplota & Vlhkost		5 °C ~ 35 °C
		15 % / 85 % RH
Senzor		Ultrazvukový
Úroveň detekce		G-senzor
Náklon varování		>5 °
Automatické vypnutí		20 sekund

! UPOZORNĚNÍ



Pokud náklon překročí 5°, rozsvítí se oranžové výstražné světlo tudíž v měření nelze pokračovat. Prosím upravte úhel zařízení, dokud výstražná světla naklonění nezmizí a poté provádějte měření.

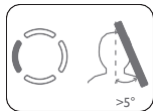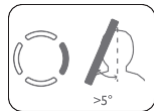

Chybové zprávy



Výška přesahuje 250 cm / 8'



Výška pod 50 cm / 1,8"



Nízký baterie

Všeobecné Informace

Děkujeme, že jste si vybrali toto zařízení od Charder Medical. Přístroj je navržený tak, aby byl uživatelsky jednoduchý, v případě, že narazíte na problémy, které nejsou popsány v tomto návodu kontaktujte vašeho místního servisního partnera.

Všeobecné zacházení

Pro přesné měření vyžaduje, aby chodidla, záda a hlava subjektu byla vyrovnána.

Bezpečnostní pokyny

- Baterie by měly být uchovávány mimo dosah dětí. Při požití, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Předpokládaná životnost: 5 let.
- Dodržujte přípustné okolní teploty pro použití

Environmentální pokyny & čištění

- Všechny baterie obsahují toxické sloučeniny; baterie by měly být likvidovány prostřednictvím určených příslušných organizací. Baterie by se neměly spalovat.
- Povrch zařízení by měl být čištěn pomocí ubrousků na bázi alkoholu.

Záruka/odpovědnost

- Záruční doba je osmnáct (18) měsíců, počínaje datem nákupu. Uschovejte si prosím účtenku jako doklad o zaplacení.
- Neneseme žádnou odpovědnost za škody způsobené skrz některý z následujících důvodů: nevhodné nebo nesprávné skladování, používání, úpravy, přirozené opotřebení nebo pád na podlahu.
- Toto zařízení neobsahuje žádné uživatelem udržované části. Veškerou údržbu, technické prohlídky a opravy by měl provádět autorizovaný servisní partner Charder s použitím originálního příslušenství a náhradních dílů Charder.

Likvidace

- S tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným domovním odpadem, ale je třeba jej odevzdat na určená sběrná místa pro elektroniku. Další informace by měly poskytnout místní úřady pro likvidaci odpadu.

Vyrobena:

Charder Elektronický spol. Ltd.

Č. 103, Guozhong Rd., Dali Dist.,
Taichung City, 41262 Tchaj-wan (R.O.C)

CD-IN-00387 REV 001 03/2021