

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Przed użyciem proszę uważnie przeczytać.

CECHY

1. Szybki pomiar oralny i rektalny w ciągu 9 do 15 sekund.
2. Łatwe odczytywanie wyniku z ciekłokrystalicznego wyświetlacza (LCD).
3. Przyrząd jest wodoszczelny.

OPIS CZĘŚCI



SPECYFIKACJA

Zakres pomiarowy:	32,0 °C do 43,9 °C (90 °F do 110 °F); Poniżej 32,0 °C (90 °F) wskazanie L °C (°F)
Przeznaczenie:	Pomiar temperatury ciała
Rozdzielcość:	±0,1 °C (0,1 °F)
Dokładność pomiaru:	±0,1 °C (34,0 °C do 42,0 °C), ±0,2 °C (inny zakres pomiaru)
Wyświetlacz:	Wyświetlacz ciekłokrystaliczny 3 1/2 cyfry
Baterie: (w zestawie)	Micro Alkaline 192, LR41 1,55 V
Zużycie energii:	0,15 mW w trybie pomiaru
Zwrotność baterii:	Ponad 200 godzin w pracy ciągiej
Stopień ochrony:	IP 27 (ochrona przed stałymi ciśniami obcymi o średnicy identyfikatorów 12,5 mm i ochrona przed tymczasowym zanurzeniem w wodzie)
Wymiary:	135 mm x 23,2 mm x 12 mm
Waga:	ok. 15 gram z baterią
Sygnal:	Sygnal akustyczny przez ok. 8 sekund, jeżeli nie pojawi się istotny wzrost temperatury
Pamiec:	Wbudowana pamięć, umożliwiająca wyświetlanie poprzednich wartości pomiaru.
Warunki zastosowania:	Temperatura: 10 °C do 40 °C (50 °F do 104 °F), Wilgotność powietrza: 15 % do 95 % RH

Warunki przechowywania: Temperatura: -25 °C do 55 °C (-13 °F do 131 °F), Wilgotność powietrza: 15 % do 95 % RH DIN EN ISO 80601-2-56 Medyczne urządzenia elektryczne – Część 2-56: Wymagania szczegółowe dotyczące postępowego bezpieczeństwa i zasadniczego działania termometrów medycznych do pomiaru temperatury ciała (ISO 80601-2-56). Geratherm® jest certyfikowana w oparciu o dyrektywy 93/42/EWG i EN ISO 13485 oraz uprawniona do stosowania znaku €0197 (jednostka notyfikowana TÜV Rheinland LGA Products GmbH).

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC): Niniejszy produkt medyczny jest urządzeniem o bardzo wysokim stopniu odporności na zakłócenia. Dlatego zrezygnowano z doliczenia tabel EMC.


WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Korzystanie z termometru nie zastępuje wizyty lekarskiej. W przypadku utrzymującym się gorączki, w szczególności u dzieci, należy zgłosić się do lekarza. Proszę skonsultować się z Państwa lekarzem rodzinnym!
2. Pomiar temperatury u dzieci wykonywać pod nadzorem osoby dorosłej.
3. Przechowując termometr w miejscu niedostępny dla dzieci. Od termometru mogą się oderwać małe części. Istnieje niebezpieczeństwo ich połknienia przez dzieci oraz uduszenia wskutek przedostania się części do dróg oddechowych.
4. Termometr nie wolno goować, nagryzać, zginać, upuszczać, ani rozkładać na części.
5. Nigdy nie otwierać termometru, z wyjątkiem wymiany baterii.
6. Unikać pomiarów temperatury w ciągu 30 minut po wysiłku fizycznym, kąpieli lub jedzeniu.
7. Podczas używania, przechowywania lub transportu nigdy nie wyciągać termometru na bezpośrednie działanie słońca, wilgoci lub skrajnych temperatur oraz chronić przed zabrudzeniem.
8. Nigdy nie używać termometru, jeżeli jego działanie jest neregularne lub wyświetlacz jest uszkodzony.
9. Przed użyciem termometr powinien osiągnąć temperaturę pokojową, jeżeli był przechowywany w znacznie niższych temperaturach.

WYMIANA BATERII

1. Gdy pojawi się symbol „ ”, należy wymienić baterię.
2. Zdejmowanie osłony baterii z termometru, a następnie usunąć czarną gumę.
3. Do zdejmowania osłony baterii i wyjęcia starej baterii stosować wykłaczkę lub podobny przedmiot.
4. Unikać przy tym stosowania ostrych przedmiotów metalowych.
5. Umieścić nową baterię w przegrodzie.
6. Założyć osłonę baterii i zamocować ją.

⚠ Przechowywać w miejscu niedostępny dla dzieci. Nigdy nie wrzucać termometru lub baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować!

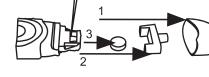

STOSOWANIE

1. Przed użyciem zdezynfekować czujnik pomiarowy alkoholem etylowym (do wcierania).
2. Wcisnąć przycisk WŁĄCZONY/WYŁĄCZONY. Na wyświetlaczu pojawi się **1888** lub **1888**.
3. Puścić przycisk WŁĄCZONY/WYŁĄCZONY, na wyświetlaczu pojawi się L, °C lub L, °F, przy czym symbole °C °F migają.
4. Umieścić sondę pomiarową (w ustach, odbycze lub pod pachą).
5. Jak tylko termometr nie będzie rejestrował dalszego znacznego wzrostu temperatury, symbol °C przestanie migać i wyświetli się zmierzona wartość maksymalna, jednocześnie będące sygnałem kilku sygnałów dźwiękowych.
6. Termometr będzie kontynuował pomiar temperatury przez kolejną minutę po zakończeniu sygnału dźwiękowego, w tym czasie możliwy jest niewielki wzrost wyświetlonej temperatury. Następnie zmierzona temperatura maksymalna zostanie zarejestrowana i wskazywana na wyświetlaczu LCD do momentu automatycznego wyłączenia po 3 minutach oraz zapisana. Termometr można również wyłączyć samodzielnie, wciskając przycisk ON/OFF.
7. Po ok. 3 minutach przyrządy wyłączy się automatycznie. W celu przedłużenia żywotności baterii, po zanotowaniu temperatury, termometr powinien zostać wyłączone przez naścieranie przycisku WŁĄCZONY/WYŁĄCZONY.

CECHY SZCZEGÓLNE

Wywoływanie ostatniej zmierzanej wartości: Gdy aktywuje się termometr przyciskiem WŁĄCZONY/WYŁĄCZONY należy go wcisnąć przez 2 sekundy. Wyświetlane cyfry 188,8 zmienia się i wskazywana jest ostatnio mierzona temperatura. Ta wartość wskazywana jest tak dugo, jak długo wcisniesz przycisk. Po zwolnieniu przycisku termometr przechodzi w modus „gotowość do pomiaru”, a wywolana temperatura ulega skasowaniu.

Wskaźnik podwyższonej temperatury: Jeżeli temperatura przekracza 37,5 °C (99,5 °F), pojawi się sygnał wskazania gorączki (szybki sygnał dźwiękowy przez ok. 8 sekund).

Przelatania między stopniami Celsiusa i Fahrenheit: Włączyć termometr, a następnie naciąć i przytrzymać przycisk OFF przez ok. 2 sekundy. W celu zapisania wybranej jednostki pomiaru (°C lub °F) wykonąć do końca jeden pomiar.

⚠ UWAGA: Na czujnik pomiarowy można nałożyć jednorazową osłonę, aby uniknąć przenoszenia wirusów. Stosowanie osłon jednorazowych może prowadzić do odchyłek od rzeczywistej temperatury rzędu 0,1 °C (0,2 °F). Po dokonaniu pomiaru osłonę jednorazową należy wyrzucić.

METODY POMIARU

⚠ Możliwy jest tylko pomiar temperatur, przekraczających temperaturę

ORALNE

Umieścić czujnik pomiarowy głęboko pod językiem pacjenta. Poprosić pacjenta o zamknięcie ust. Przy tej metodzie pomiaru normalna temperatura wynosi od 36,0 °C do 37,5 °C (od 98,8 °F do 99,6 °F).

REKTALNE: Jeżeli lekarz zaleca pomiar rektalny, to można do tego stosować jednorazowe osłony na czujnik pomiarowy. Termometr włożyć do osłony jednorazowej. Dla ułatwienia wprowadzenia można stosować środek posilżujący (nie stosować waselinę surowej). Końcówka czujnika pomiarowego nie wprowadzać do odbytu głębiej niż 1,5 cm. W razie pojawienia się oporu wprowadzanie ZATRZYMAĆ. Temperatura mierzona rektalnie jest ok. 0,5 °C do 1,0 °C (1,0 do 2,0 °F) wyższa od temperatury mierzonej orálnie.

POD PACHA: Przetrząść dolej pachowym suchym ręcznikiem. Sondę pomiarową ułożyć w dolku pachowym pacjenta i docisnąć ramie do jego barku. Temperatura mierzona pod pachą jest z reguły o 0,5 °C do 1,0 °C (1,0 °F do 2,0 °F) niższa od temperatury mierzonej dostojnie. Należy pamiętać, że do osiągnięcia lepszego wyniku pomiaru temperatury pod pachą, niezależnie od sygnału dźwiękowego zalecaną jest minimalna czas pomiaru, wynoszący 2 do 3 minuty.

⚠ W przypadku porównywania temperatur dwóch termometrów możliwe jest uzyskanie dwóch różnych wartości, nawet gdy nie jest przekroczony zakres dokładności termometrów. Pewne odchylenia występują przy każdym pomiarze, a zakres tolerancji termometru może wykazywać różnicę prawie 0,1 °C (0,2 °F).

RADA: Ustalić swoją normalną temperaturę i uważać na zmiany.

CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA

W przypadku użytku domowego głośniki sondy pomiarowej czyszczą zawsze przed i po każdym użyciu.

Główne sondy pomiarowe przeznaczone lekko roztworem mydła i ciepłej wody. Dezynfekować termometr przecierając sondę i dolną część obudowy scierką nasączoną alkoholem (zalecenie: alkohol izopropylowy 70%).

Termometr jest wodoodporny.

Nie gotować termometru i nie czusić w autoklawie.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UTYLIZACJI

W przypadku użycia termometru i baterii należy przestrzegać obowiązujących przepisów. Termometr nie można użyczać z odpadami komunalnymi.

Każdy użytkownik ma obowiązek oddać wszystkie urządzenia elektryczne lub elektroniczne, niezależnie od tego czy zawszeria one szkodliwe substancje, do punktu złomu we własnym mieście lub do dystrybutora, by zapewnić utylizację przyjazną dla środowiska. Przed użyciem termometru wyjąć baterie. Nie wyrzucać zużytych baterii z odpadami komunalnymi, użycować je jako odpady specjalne w punktach zbiórki baterii w specjalistycznych sklepach.

GWARANCJA

Na tento termometr przy normalnym stosowaniu na okres dwóch lat od daty zakupu udziela się gwarancji na wypadek ewentualnych dań spowodowanych przez producenta. Dokładne przestrzeganie wskazówek gwarantuje wieloletnie, niezawodne działanie. Jeżeli termometr nie działa prawidłowo, to należy najpierw sprawdzić baterie (patrz instrukcja wymiany baterii). Możliwe, że trzeba ją wymienić. Przy stosowaniu profesjonalnym zaleca się raz na dwa lata sprawdzać przyrząd w autoryzowanym laboratorium pomiarowym (w Niemczech wymagają tego przepisy ustawowe). Przy usuwaniu przyrządu i baterii należy przestrzegać obowiązujących przepisów.

OBJAŚNIENIE SYMBOLI

	postępować zgodnie z instrukcją użycioką
	chronić przed wilgocią
	przechowywanie przy względnej wilgotności powietrza od 15 % do 95 % RH
	przechowywanie w temperaturze od -25 °C do +55 °C
	urządzenie nie może być użycowane z odpadami komunalnymi

Geratherm Medical AG
Fahrenheitstrasse 1
98716 Geschwenda
Niemcy
www.geratherm.com

Lékařský digitální teplomer
Geratherm® rapid GT-195-1

C€0197

PL

CS

SK

GERATHERM

UPUTA ZA UPORABU
Pre upotrebe molimo pažljivo pročitate.**OBLJEŽJA**

- Brzo oralno i rektalno mjerjenje tjelesne temperature za 9 do 15 sekundi.
- Vrlo jednostavno očitavanje pokazivanja tekućim kristalima (LCD).
- Uredaj je vodonepropustan.

OPIS DJELOVA**SPECIFIKACIJA**

Raspont mjerjenja:	32,0 °C do 43,9 °C (90 °F do 110 °F); Ispod 32,0 °C (90 °F) zaslon L°C (°F)
Namjena:	Iznad 43,9 °C (109 °F) zaslon H°C (°F)
Preciznost:	0,1 °C (°F)
Točnost:	±0,1 °C (34,0 °C do 42,0 °C), ±0,2 °C (drugo područje mjerjenja)
Zaslon:	±0,2 °F (93,2 °F do 107,6 °F), ±0,4 °F (drugo područje mjerjenja)
Baterija: (priložena)	Zaslon s tečnim kristalima 3 1/2 cifre
Potrošnja energije:	Micro Alkaline 192, LR41 1,55 V
Zivotni vijek baterije:	0,15 milijawta kod mjerjenja
Stupanj zaštite:	Preko 200 sati neprekidnog rada
Dimenzije:	IP 27 (zaštićeno protiv čvrstih stranih tijela promjera od 12,5 mm i zaštićeno protiv kratkotrajnog uranjanja u vodu)
Težina:	135 mm x 23,2 mm x 12 mm
Signal:	Caa. 15 grama uključujući bateriju
Memorija:	Akustični signal od caa. 8 s nakon što se više ne može utvrditi relevantni porast temperature
Radni uvjeti:	Ugradena memorija koja omogućava prikaz zadnjih vrijednosti mjerjenja.
Uvjeti skladistišta:	Temperatura: 10 °C do 40 °C (50 °F do 104 °F); Vlažnost zraka: 15 % do 95 % R. H.
Jamstvo kvaliteta:	⚠️ Moguće je samo mjerjenje temperaturu koju su više od temperature okoline.
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC):	Temperatura: -25 °C do 55 °C (-13 °F do 131 °F); Vlažnost zraka: 15 % do 95 % R. H.
	DIN EN ISO 80601-2-56 Medicinski električni uređaji – odlok 2-56: Posebne definicije za sigurnost, uključujući bitne znakajuće medicinskih topolomera koji služe za mjerjenje tjelesne temperature (ISO 80601-2-56). Geratherm® je certificiran prema smjernici 93/42/EEG i EN ISO 13485 i ima pravo korištenja oznake C€0197 (Ovlašteni organ TÜV Rheinland LGA Products GmbH).


Kod ovoga medicinskog proizvoda radi se o uređaju s iznimno velikim stupnjem otpornosti na smetnje. Zato odustajemo od tiskanja priloga EMV-tabele.

SIGURNOSNE NAPOMENE

- Korištenje topolomera nije zamjena za posjetu ljekaru. Dugotrajna grozna, naročito kod djece, je razlog za posjetu ljekaru. Kontaktirajte Vašeg ljekara!
- Temperatu rukodje mjeriti pod nadzorom odrasle osobe.
- Topolomer držati izvan dohvata djece. Mali djevojki mogu se odvojiti od topolomera. Djeca ih mogu pogutati ili postoji opasnost gušenja uđanja djevojki.
- Ne kuhatje ovaj topolomer, na zagrizajte ga, ne savajjite ga, ne dozvolite da padne i ne rasklapajte ga.
- Ne otvarjajte nikad topolomer osim onda kada želite zamjenjiti baterije.
- Izbegavajte mjerjenje temperature u vremenu od 30 minuta nakon sportske aktivnosti, poslije kupanja ili jela.
- Kod korištenja, čuvanja ili transporta nikad ne izlažite topolomer izravno sunčevoj svjetlosti, vlagi ili ekstremnim temperaturama i štitite ga od prijavštine.
- Ne koristite više topolomjer ako neravnomjerno radi ili ako je zaslon neispravan.
- Prije korištenja topolomjer zagrijati na sobnu temperaturu ako je čuvan na dosta nižoj temperaturi.

ZAMJENA BATERIJE

- Ukoliko se pojavlji simbol „D“, treba zamjeniti bateriju.
- Skinite zaštitno pokrivalo baterije s topolomera, a zatim odstranite crnu gumu.
- Upotrijebite čačkalici ili silicno biste olabaviti zaštitno pokrivalo i staru bateriju. Izbegavajte pri tome upotrebu oštreljivih metalnih predmeta.
- Uložite novu bateriju u prethvac za bateriju.
- Natankite opet zaštitno pokrivalo baterije i sigurno ga pričvrstite.

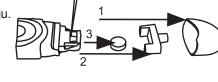

⚠️ Čuvati izvan dohvata djece. Ne bacajte bateriju ili topolomer u vatru – mogli bi eksplodirati!

PRIMJENA

- Prije upotrebe dezinficirajte osjetilo alkoholom.
- Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje. Na zaslonu ćete vidjeti **1888** ili **1888**.
- Otputujte tipku za uključivanje/isključivanje. Na zaslonu će se pojaviti L°C ili L°F, pri čemu °C ili °F treperi.
- Postavite senzor (oralno, rektalno ili aksilarno).
- Čini topolomer ne pokazuje više relevantan porast temperature, °C prestaje svjetlati i prije toga izmjerena maksimalna vrijednost se prikazuje pri čemu čuje niz signalnih tonova.
- Topolomer nakon signalnog tonu nastavlja s mjerjenjem temperature još jednu minutu pri čemu je moguć daljni neznačajni porast prikazane temperature. Potom se izmjerena maksimalna temperatura do automatskog isključivanja nakon 3 minute zadržava i prikazuje na LCD-zaslonu. Ili krozni pritisak gumba AN/AUS te topolomer može izravno isključiti.
- Uredaj se automatski isključi nakon caa. 9 minuta. Da bi se produžio vek trajanja baterije, bolje bi bilo da pritisnete tipku za uključivanje/isključivanje u svrhu isključenja, nakon što se zabilježili temperaturi.

OSOBITA OBLJEŽJA


Poziv zadnje izmjerene vrijednosti: Ako pritisnete tipku za uključivanje/isključivanje radi aktiviranja topolomera, držite ovu tipku 2 sekundi stisnutu. Pokazivanje 188,8 se mijenja da bi se pokazala zadnja izmjerena temperatura. Ova ocitana vrijednost se pokazuje sve dok je pritisnuta tipka. Ako otpustite tipku, topolomer se nalazi u „modusu spremnosti za mjerjenje“, a pozvana temperatura se briše.

Indikator groznice: Ukoliko je temperatura iznad 37,5 °C (99,5 °F), čuje se signal za indikaciju groznice (brzi piskavi ton koji neprekidno traje oko 8 sekundi).

Prebacivanje između jedinicu Celsius i Fahrenheit: Uključite topolomer i pritistite i držite gumb Ein/Aus (uključeno/isključeno) 2 sekunde. Kako biste poharili željenu mjerenu jedinicu (°C oder °F), morate u potpunosti obaviti jedan postupak mjerjenja.

⚠️ **NAPOMENA:** Na osjetilo možete staviti higijenski omot za jednokratnu upotrebu, da sprječite prijenos virusa. Pri korištenju omota za jednokratnu upotrebu moguće je da dođe do odstupanja od stvarne temperature za 0,1 °C (0,2 °F). Poslije mjerjenja uklonite omot za jednokratnu upotrebu.**METODE MJERENJA**

⚠️ Moguće je samo mjerjenje temperaturu koju su više od temperarure okoline.

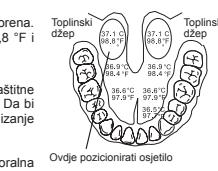ORALNO
Stavite osjetilo duboko pod jezik pacijenta. Upozorite korisnika da usta drži zatvorena. Normalna temperatura iznosi kod ovog postupka između 36,0 °C i 37,5 °C (98,8 °F i 98,6 °F).**REKTALNO**
Ako Vaš liječnik preporuči rektalno mjerjenje temperature, možete upotrijebiti zaštitne omote za jednokratnu upotrebu za osjetilo. Stavite topolomer u taj zaštitni omot. Da bi se olakšalo uvođenje topolomera, možete koristiti sredstva koja poboljšavaju klizanje (nikako sirov vezelin). Uvedite šiljak mernog osjetila najviše 1,5 cm u rektum.

STANITE ako osjetilo bilo otpor.

Rektalna temperatura je otprilike 0,5 °C do 1,0 °C (1,0 do 2,0 °F) viša nego oralna temperatura.

AKSILARNO
Područje ispod pazuha posušiti ručnikom. Glavu senzora staviti u pazušnu jamu. Stisnuti tako ruku.

Temperatura pazuha je općenito niža oko 0,5 °C do 1,0 °C (1,0 °F do 2,0 °F) od oralne temperature.

Uzmite u obzir da se za dostizanje bolje rezultata mjerjenja akstilarnje temperature **preporuča minimalno vrijeme mjerjenja od 2 do 3 minuta bez obzira na zvučni ton.**

⚠️ Upozorete da temperature između dva topolomera, moguće je da čete na zaslonu dobiti dvije različite vrijednosti, čak ako se oba topolomera nalaze u opsegu njihove tolerancije točnosti. Pri svakom mjerjenju ima razlike i opseg tolerancije topolomera može imati razliku od gotovo 0,1 °C (0,2 °F).

PREPORUKA: Ustanovite Vašu normalnu tjelesnu temperaturu i pazite na promjene.

NAPOMENE ZU ČIŠĆENJE I DEZINFKECIJU

Kod kućnog korištenja glavu senzuru uvejk očistiti prije i poslije svakog korištenja.

Obrišite glavu senzoru rastvorm od blage sapunice i hladne vode. Dezinficirajte topolomer tako što ćete senzor i donji dio kućista obrisati krpom koju ste prije toga umočili u alkohol (preporuka: izopropilni alkohol 70%).

Topolomer je vodootporn.

Topolomer ne otkuhavati i ne čistiti u autoklavama.

NAPOMENA ZA UKLANJANJE

Kod uklanjanja topolomera i baterija moraju se uvažavati važeći propisi u zemiji.

Ovaj topolomer se ne smije uklanjati zajedno s kućnim smećem.

Svaki korisnik ima obvezu predati sve električne ili elektronske uređaje, bez obzira da li sadrže štetne tvari ili ne, u nadležnom odjelu u općini ili u trgovini kako bi se oni mogli ukloniti sukladno propisima o zaštiti okoliša.

Izdavite prijedlog nego što uklonite topolomer. Ne bacajte iskoristene baterije u kućnu smeću već u posebno smjeće ili ih predajte nadležnom mjestu za skupljanje baterija u specijaliziranim trgovinama.

JAMSTVO

Na ovaj topolomer daje se garantija od dvije godine, računato od datuma kupnje, uz uvjet normalne primjene, a za eventualne greške od strane proizvođača. Ako se točno držite uputa za upotrebu, garantirano je dugogodišnje i pouzdano funkcioniranje topolomera. U slučaju da topolomer ne funkcioni pravilno, najprije provjerite baterije (vidi navodila za menjavu baterije). Baterije po potrebi zamjenjajte.

Pri profesionalnoj uporabi se priporuči, da aparat vsaka 3 leta zaupate pooblašćenom laboratoriju zaradi merilno tehničnega preverjanja (u Nemčiji je to z zakonom predpisano). Pri odlaganju / odstranjanju aparatara ter baterij se moraju upotrebiti posamezno veljavni predpisi.

Pri odlaganju uređaja i baterija treba užeti u obzir dočice važeće propise.

KAZALO SIMBOLA

	djelovanje u skladu s uputom za uporabu
	čuvati od vlage
	skladištenje pri rel. vlažnosti zraka između 15% i 95% R.H.
	+55°C -25°C
	uredaj se ne smije odlagati u kućno smjeće

NAVODILA ZA UPORABO
Prosimo, da pred uporabno pozorno preberete.**ZNAČILNOSTI**

- Hitro mjerjenje oralne i rektalne temperature u 9 do 15 sekundi.
- Prikaz s tečnim kristalom, ki se ga zlahka odčita (LCD).
- Aparat je neupotrebljiv.

OPIS DELOVA**SPECIFIKACIJA**

Merilno območje: 32,0 °C do 43,9 °C (90 °F do 110 °F); Pod 32,0 °C (90 °F) prikazuje L°C (°F)

Uporaba: Nad 43,9 °C (109 °F) prikaz H°C (°F)

Merjenje tjelesne temperature

Točnost mjerjenja: ±0,1 °C (34,0 °C do 42,0 °C), ±0,2 °C (drugo merilno območje)

Prikazovanje: ±0,2 °F (93,2 °F do 107,6 °F), ±0,4 °F (drugo merilno območje)

Baterija: (priložena) Mikro Alkaline 192, LR41 1,55 V

Poraba energije: 0,15 milijawta kod mjerjenja

Zivotni vijek baterije: Preko 200 sati neprekidnog rada

Stupanj zaštite: IP 27 (zaštićeno protiv čvrstih stranih tijela promjera od 12,5 mm i zaštićeno protiv kratkotrajnog uranjanja u vodu)

Dimenzije: 135 mm x 23,2 mm x 12 mm

Težina: Caa. 15 grama uključujući bateriju

Signal: Akustični signal odca približno 8 s nakon što se više ne može utvrditi relevantni porast temperature

Ugradena memorija koja omogućava prikaz zadnjih vrijednosti mjerjenja.

Temperatura: 10 °C do 40 °C (50 °F do 104 °F); Vlažnost zraka: 15 % do 95 % R. H.

⚠️ Moguće je samo mjerjenje temperaturu koju su više od temperature okoline.

Temperatura: -25 °C do 55 °C (-13 °F do 131 °F); Vlažnost zraka: 15 % do 95 % R. H.