


**XD100**  
**Ozónový desinfikátor ventilátora**

---

# Návod k obsluze

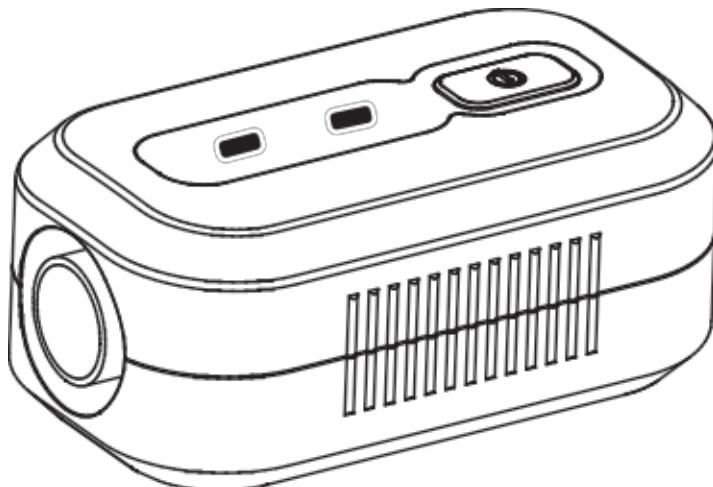

- ⚠️** Tento uživatelský návod uvádí informace o provozu, pravidelné údržbě a bezpečnosti ozónového desinfikátoru ventilátoru.
- ⚠️** Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte celý návod a uschovějte ho pro budoucí použití.
- ⚠️** Součástí návodu je záruční list. Tento list uschovějte pro účely provádění servisu v budoucnu.

# Celkový popis

Děkujeme, že jste si zakoupili přístroj RESCOMF XD100 – ozónový desinfikátor ventilátoru. Je prokázáno, že tento desinfikátor hubí 99,99 % mikroorganismů a bakterií. Zcela bezstarostný proces suché des infekce nevyžaduje žádnou vodu, mýdlo ani chemické čištění. Váš přístroj pro CPAP léčbu a související příslušenství, včetně masky a hadic, můžete kompletně desinfikovat proudem regulovaného ozónu.


## Preventivní bezpečnostní opatření

- Uchovávejte z dosahu dětí. Nedovolte dětem, aby si s výrobkem hrály.
- Vystupující ozón nevdechujte ani nepolykejte.
- Po čištění nejméně jednu hodinu přístroj CPAP a příslušenství nepoužívejte.
- Pokud pocítujete dušnost nebo jiné problémy s dechem, obraťte se neprodleně na svého lékaře.

## Upozornění týkající se ochrany životního prostředí

Výrobek obsahuje dobíjecí baterii a nemůže být likvidován společně s běžným domácím odpadem. Z důvodu zachování udržitelného životního prostředí nelikvidujte tento přístroj po dosažení konce jeho životnosti s domácím odpadem.

## Konstrukce výrobku

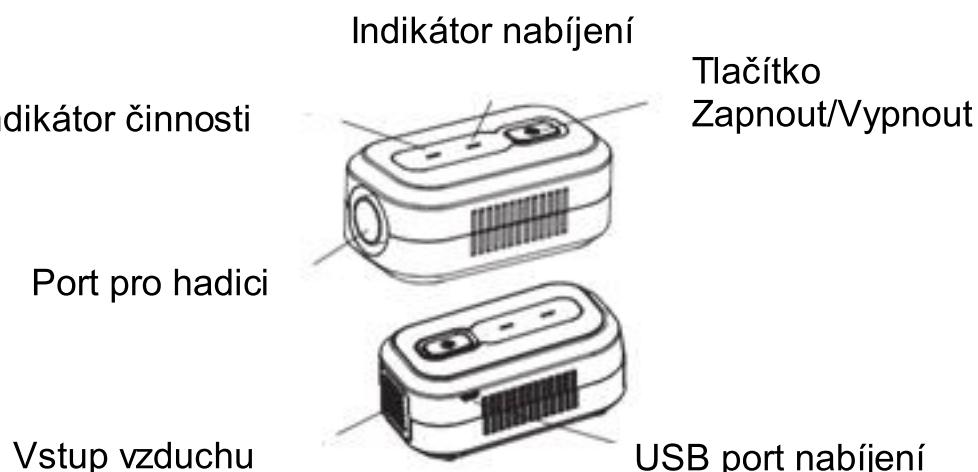


# Seznam dílů


- Ozónový desinfikátor RESCOMF XD100 pro desinfikování ventilátoru
- USB kabel pro nabíjení
- Návod k obsluze (se záručním listem)



**XD100**

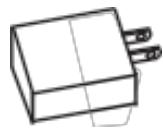

**Nabíječka**  
(volitelné příslušenství)

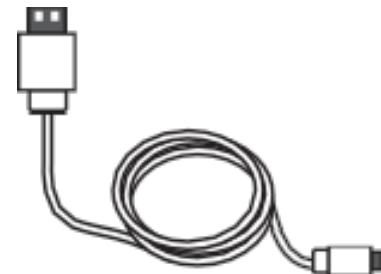

**USB kabel**



## Důležité upozornění

K nabíjení používejte dodaný USB kabel, aby bylo zajištěno dodržení specifikací pro elektrické nabíjení.

# Technické specifikace


## Specifikace

Velikost	<b>117x68x50 (mm)</b>
Hmotnost	<b>205 g</b>
Dobíjitelná lithium-iontová baterie 2000 mAh	
Příkon	<b>≤15 VA</b>
Teplota při skladování	<b>-20 ~ 55 °C</b>
Teplota při provozu	<b>10 ~ 45 °C</b>
IP (stupeň krytí)	<b>IP21</b>

Ozónový desinfikátor XD100 pracuje s optimalizovaným cyklem desinfekce, který trvá 35 minut a zahrnuje 30 minut působení ozónu a 5 minut působení čerstvého vzduchu. Cyklus není nutné opakovat.

Výrobce si vyhrazuje právo změnit výše uvedené specifikace bez oznámení.

## Schéma připojení desinfikátoru XD100 pro desinfekci ventilátoru

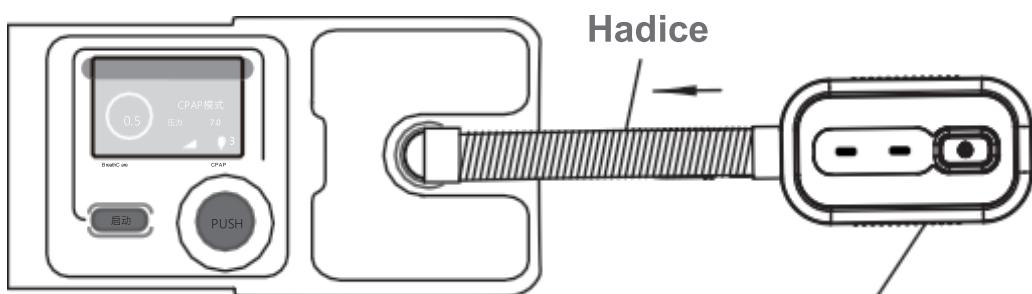

CPAP

Desinfikátor ventilátoru

# Pokyny k provozu

Před použitím ozónového desinfikátoru RESCOMF XD 100 pro desinfekci ventilátoru je třeba zajistit, aby:

- Přístroj pro CPAP léčbu/ léčbu dvěma úrovněmi přetlaku byl VYPNUTÝ.
- Z komory zvlhčovače byla odstraněna voda.
- Z hlavní hadice byla odejmuta maska CPAP a k hadici CPAP byl připojen ozónový desinfikátor ventilátoru.

**Pro dosažení lepších výsledků desinfekce je doporučeno umístit přístroj pro CPAP léčbu/ léčbu dvěma úrovněmi přetlaku a desinfikátor RESCOMF do uzavřeného kontejneru nebo přepravní tašky CPAP přístroje.**




**Použití ozónového desinfikátoru RESCOMF k desinfikování ventilátoru je jednoduché:**

- Přístroj zapnete tak, že stisknete a 3 sekundy podržíte tlačítko Zapnout/Vypnout. Jednou pípne bzučák, rozsvítí se zelená kontrolka a ozón začne proudit.
- Ozón proudí po dobu 30 minut, poté přístroj zajišťuje cirkulaci čerstvého vzduchu po dobu 5 minut. Během posledních pěti minut cyklu jsou cirkulujícím čerstvým vzduchem odstraněny zbytky ozónu. Některým uživatelům může být zápach ozónu nepříjemný.
- Po dokončení cyklu trvajícího 35 minut se přístroj automaticky vypne. To je doprovázeno 5 pípnutími. Při dokončení cyklu také zhasne zelená kontrolka.
- Po dokončení cyklu desinfikování přístroj pro CPAP léčbu/ léčbu dvěma úrovněmi přetlaku po dobu nejméně jedné hodiny nepoužívejte.

Jestliže z jakéhokoli důvodu potřebujete manuálně vypnout napájení přístroje v průběhu procesu desinfikování, stiskněte tlačítko Zapnout/Vypnout na dobu 3 sekund. Přístroj vydá dlouhé pípnutí, kterým signalizuje, že napájení přístroje je vypnuto, a zhasne zelená kontrolka.

# Nabíjení baterie

Součástí desinfikátoru ventilátoru je zabudovaná dobíjitelná baterie. Aby nabíjení baterie probíhalo, je třeba zapojit přístroj podle vyobrazení na ilustraci níže. USB kabel zapojte do portu pro nabíjení a do napájení. Rozsvítí se červená kontrolka informující o tom, že nabíjení probíhá správně. Když je baterie plně nabitá, změní se barva kontrolky na zelenou.

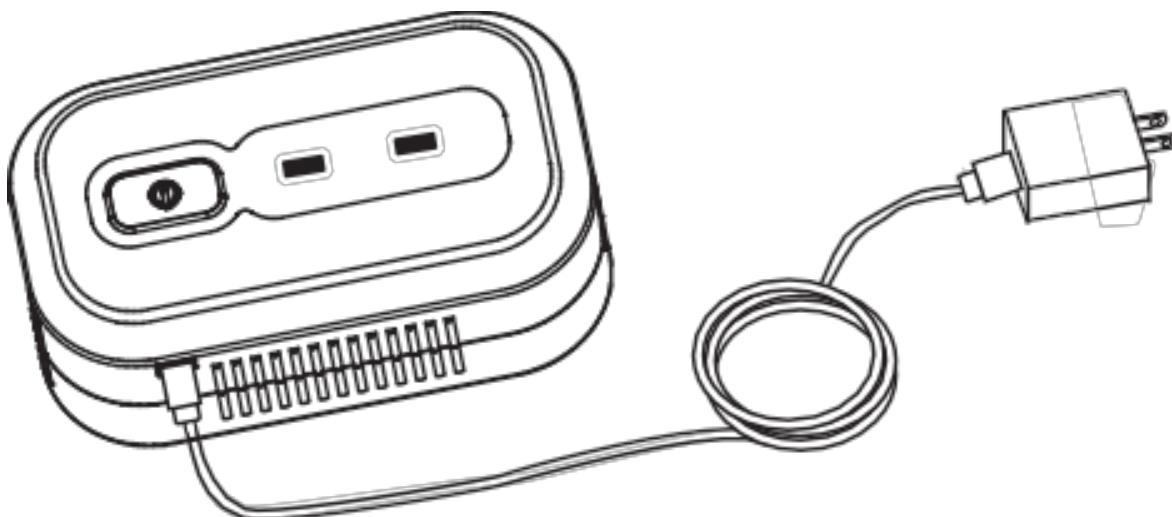

Pro dosažení co nejlepší výkonnosti a životnosti lithiové baterie přístroj na dobu nabíjení vypněte.

Doba nutná k nabití baterie se mění v závislosti na teplotě okolního prostředí a zbývající kapacitě baterie. Jestliže se baterie po úplném nabití rychle vybíjí, dosáhla konce své životnosti a je nutné celou jednotku vyměnit.

Indikace nízkého nabití baterie: Když je baterie málo nabitá, hlavní kontrolka bliká a zazní dlouhá zvuková signalizace bzučáku. Desinfikátor pokračuje v činnosti, dokud nedojde k úplnému vybití baterie. Je možné, že jednotka nedokončí celý 35minutový cyklus. Proto doporučujeme desinfikátor nabít, jakmile kontrolka začne blikat.

# Důležitá upozornění

- U přístrojů CPAP, které jsou konfigurovány se zvlhčovačem, musíte před desinfikováním prováděným pomocí ozónu odstranit z komory zvlhčovače vodu.
- Po procesu desinfikování počkejte nejméně jednu hodinu a teprve poté přístroj CPAP použijte, aby bylo zaručeno, že došlo k rozptýlení zápachu ozónu.
- Koncentrace ozónu je regulována desinfikátorem, uzavřeným kontejnerem a dobou desinfikování. Výrobek je navržen tak, aby dosahoval té nejlepší výkonnosti desinfekce a přitom byla zachována bezpečnost prostředí. Je doporučeno, aby uživatel neměnil žádné nastavení.
- Dobíjatelné baterie 2000 mAh mají stejnou kapacitu jako baterie pro mobilní telefon a u většiny leteckých společností spadají do kategorie přijatelné pro cestování.
- Záruka přístroje **POZBÝVÁ PLATNOSTI** v případě, že opravy přístroje jsou provedeny neautorizovanou osobou nebo nejsou použity originální náhradní díly RESCOMF. Jestliže potřebujete záruční servis, obratěte se na svého dodavatele.
- Je doporučeno desinfikovat přístroj CPAP, hadici a masku každý týden.

## Omezená záruka

Společnost RESCOMF poskytuje na výrobek záruku 1 rok od data nákupu. Na související příslušenství se vztahuje záruka v délce 90 dnů.

Záruka se nevztahuje na poškození krytu způsobené nesprávným použitím a na normální opotřebení.

Záruka se vztahuje na závady výrobku způsobené výrobními vadami nebo vadami materiálu. Záruční servis a výměna je na uvážení společnosti RESCOMF.

# Řešení problémů

Problém	Možné řešení
<b>Výrobek po zapnutí nepracuje</b>	Zapojte přístroj do nabíječky. Nabíječku zastrčte do napájecí zásuvky. Zapněte přístroj.
<b>Světelná kontrolka nabíjení nesvítí</b>	Ujistěte se, že baterie byla nabíjena nejméně po dobu jedné hodiny. Zkontroluje nabíječku a USB připojení.
<b>Přístroj ukončí činnost bez vydání zvuku</b>	Baterie je vybitá. Připojte přístroj k napájení a nabijte ho.
<b>Baterie je plně nabita, přístroj však nepracuje</b>	Zkontrolujte, zda je nabíječka připojena správně, a přesvědčte se, že používáte dodaný USB kabel. Pokud se tímto problém nevyřeší, zašlete výrobek do místa nákupu za účelem provedení opravy nebo výměny.
<b>Po 35 minutách nedojde k automatickému ukončení činnosti přístroje</b>	Přístroj vypnete tak, že stisknete tlačítko Zapnout/Vypnout a 3 sekundy ho podržíte. Poté zkuste tlačítkem přístroj opět zapnout. Pokud se výše popsaným postupem nepodaří problém vyřešit, zašlete přístroj k opravě/výměně.
<b>Nedochází ke generaci ozónu</b>	Jestliže po stisknutí tlačítka Zapnout/Vypnout nedojde k rozsvícení kontrolky a ventilátor desinfikátoru nepracuje, zapojte přístroj do nabíječky a nabíječku zapojte do napájecí zásuvky. Zapněte přístroj. Jestliže se indikátor činnosti rozsvítí zeleně, ale ventilátor desinfikátoru nepracuje, zašlete výrobek zpět do místa původního nákupu k opravě.

# Záruční list

# ZÁRUČNÍ LIST

Jméno zákazníka: \_\_\_\_\_ Kontaktní telefonní číslo \_\_\_\_\_

Kontaktní adresa:

Sériové číslo výrobku:    Datum nákupu:

Název/razítko dodavatele: Datum opravy:

## Záznam o opravě

Hlavní jednotka:

Příslušenství

Záruční list a doklad o zakoupení uschovějte. Záruční list je platný s razítkem dodavatele nebo dokladem o zakoupení. Děkujeme za spolupráci.

# Prohlášení o shodě

Tento přístroj vyhovuje části 15 předpisů FCC. Provozování přístroje podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) tento přístroj musí akceptovat jakékoli přijímané rušení, včetně takového, které může způsobovat nežádoucí činnost přístroje.

## Poznámka

Provedením změn nebo úprav, které nejsou výslovně schváleny stranou zodpovědnou za shodu s předpisy, by mohlo dojít ke ztrátě platnosti oprávnění uživatele k provozování přístroje.

Tento přístroj byl podroben zkouškám a bylo shledáno, že vyhovuje meziklasifikaci pro digitální přístroj třídy B podle části 15 předpisů FCC. Tyto meze jsou navrženy tak, aby poskytovaly rozumnou ochranu proti škodlivému rušení při domovní instalaci.

Tento přístroj vytváří, využívá a může vyzařovat energie v pásmu rádiových frekvencí, a pokud není instalován v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že u konkrétní instalace k rušení nedojde. Pokud přístroj způsobuje škodlivé rušení příjmu rádiového nebo televizního vysílání, což lze ověřit vypnutím a zapnutím přístroje, doporučuje se uživateli, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo několika z následujících opatření:

- Změna orientace nebo přemístění přijímací antény
- Zvětšení vzdálenosti mezi přístrojem a přijímačem
- Zapojení přístroje do elektrické zásuvky, která je součástí jiného okruhu, než je okruh, jehož součástí je zásuvka, do které je zapojen přijímač
- Požádejte o pomoc dodavatele nebo zkušeného rozhlasového/televizního technika.

**RESCOMF® CE0598**

Výrobce: GuangDong EDA Technology Co., Ltd.

Adresa: Shui Wei Industrial Zone, TangJiao,  
Cha Shan Town, Dong Guan City,  
Guang Dong Province, China

E-mail služeb pro zákazníky v ČR: [quality@amimedical.cz](mailto:quality@amimedical.cz)

Tel.: 257 325 606